

INSTRUÇÕES DE USO DO COLCHÃO DE AR AQUECIDO DESCARTÁVEL

Modelo: Longo ou Curto



Produto: Não Estéril

Colchão de ar aquecido descartável de uso exclusivo no Sistema de Colchão Térmico WarmCloud, KanMed.
O colchão é fabricado em material plástico flexível que oferece uma resistência necessária para levantar o paciente de peso até 135 kg e gera um ambiente aquecido e confortável durante o procedimento cirúrgico de longa duração.

ADVERTÊNCIA: O fabricante recomenda o uso único, caso contrário, poderá ocorrer vazamento devido ao enfraquecimento do material plástico, ou provocar rompimento durante a cirurgia e causar risco de segurança ao paciente.

Apresentação

Em cada embalagem de filme de plástico transparente contém uma unidade. São 2 modelos: Longo e Curto.

| Foto | Código | Descrição (Dimensões) |
|--|------------|---|
|  | OT-600-222 | Colchão de Ar Aquecido Descartável, Longo, 200cm x 60cm Adequado para a maioria do paciente na posição supina, mas também na lateral ou de bruços. |
|  | OT-600-211 | Colchão de Ar Aquecido Descartável, Curto, 110cm x 50cm Adequado para paciente em posição litotômica (com as pernas elevadas) ou para crianças pequenas. |

Armazenar num local fresco, ventilado, seco e ausência de gases nocivos.

- O produto não pode sofrer a exposição direta de raio solar.
- O produto deve ser armazenado na embalagem original e não retirá-lo da embalagem, a não ser quando este é utilizado no sistema.

Instruções de Uso

- Leia atentamente as instruções do Manual do Usuário do Sistema de Colchão Térmico, KanMed WarmCloud, antes de utilizar. Disponível em www.panamedical.com.br/manuais nº 10234379017.
- Verifique a validade do produto. Não usar se estiver vencida ou com a embalagem violada.
- Retire o colchão térmico da embalagem e coloque-o sobre a mesa cirúrgica.
- Conecte o tubo de ar na entrada do colchão e fixe o velcro (sobre a parte emborrachada) com força. Faça o mesmo com o outro tubo. Amarre as cintas/faixas de segurança no trilho da mesa cirúrgica.
- Coloque uma almofada ou travesseiro sob a parte do paciente localizada mais próxima à entrada de ar.
- Respeite o peso máximo recomendado de 135 kg. O peso mínimo recomendado é aproximadamente 2 kg.
- Após o uso, descarte adequadamente de acordo com as normas adotadas pela clínica ou hospital.
- Ambiente de Uso: +15°C a +35°C com umidade relativa menor que 90% e pressão atmosférica de 700 a 1060 hPa (equivalente a altura máxima de aproximadamente 3000m).

Especificações

- Material Base: Plástico EVA (Etileno/Acetato de Vinil) com capa lisa
- Validade: Indeterminado
- Peso Máximo Permitido: < 135 kg
- Modelos:

Dados do Fabricante e Importador

Fabricante:

KanMed AB
Gårdsfödevägen 18B
SE – 168 66, Bromma, Sweden
Fone: +46 8 5648-0630,
FAX: +46 8 5648-0639
E-Mail: info@kanmed.se
Web: www.kanmed.se

Importador/Distribuidor/Assistência Técnica



PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA.
Rua Borges Lagoa 423 – 04038-030 Vila Clementino São Paulo/SP
Tel.: (11) 2344-1900 / (11) 5575-7844
www.panamedical.com.br
Pedidos: comercial@panamedical.com.br SAC.:
qualidade@panamedical.com.br Assistência Técnica:
atec@panamedical.com.br Responsável Técnico
Eng. Ricardo Toshimitsu Yamaguti CREA:
nº5061354623

Aviso



O CORRETO é sempre amarrar as cintas/faixas de segurança do colchão no trilho da mesa cirúrgica. Não deixar solto porque pode causar acidente de escorregamento e queda do paciente.

Coloque uma almofada embaixo do calcanhar do paciente, principalmente quando a saída de ar quente estiver próxima, para prevenir sobreaquecimento e queimadura. Coloque um travesseiro se for a cabeça que estiver próxima à saída de ar.

Garantia do Produto

Termo de Garantia Legal

(De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.)

A empresa **Panamedical Sistemas Ltda.**, em cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 vem por meio deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos os produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Parágrafo 3º do Art. 26 da Lei 8.078.

Para que o presente Termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as condições abaixo descritas e docertificado de garantia anexo:

- 1) Não permitir que pessoas não autorizadas realizem a manutenção dos materiais em questão.
- 2) Não permitir o uso indevido bem como o mau uso dos materiais em questão.
- 3) Seguir detalhadamente todas as orientações de uso, bem como os cuidados de limpeza e conservação descritos no Manual de Instruções.